

KERN[®]

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Montage-instructie Set hoofd-/voetsteun

KERN MBC-A05

Versie 1.0
04/2014
NL



MBC-A05-IA-nl-1410



KERN MBC-A05

Versie 1.0 04/2014

Montage-instructie Set hoofd-/voetsteun

Inhoudsopgave

1	Technische gegevens.....	3
2	Leveringsomvang	3
3	Omschrijving	3
4	Montage	4
5	Reinigen/ desinfectie	4

1 Technische gegevens

KERN	MBC-A05
Afmeting [mm] compleet gemonteerd	600x280x128
Netto gewicht [kg]	350

2 Leveringsomvang

- 1 weegschaalplateau met hoofdsteun en voetsteun
- Montage-instructie

3 Omschrijving

De hoofd- en voetsteun KERN MBCA05 vormen zijdelingse afschermingen van het weegschaalplateau voor grotere veiligheid van de baby.

4 Montage

	<p>De set hoofd-/voetsteun op de weegschaal monteren, als op de afbeelding getoond.</p>
	<p>De gemonteerde set hoofd-/voetsteun.</p>

5 Reinigen/ desinfectie

De schaal van de weegschaal en de behuizing uitsluitend met een reinigingsmiddel voor huishoudelijk gebruik reinigen of met een in de handel toegankelijke desinfectiemiddel. De aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.

Geen poetsmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen, zoals gedistilleerd alcohol, benzine of gelijke, gebruiken omdat ze de hoogwaardige oppervlakte kunnen beschadigen.

Om een kruisbesmetting (mycose, ...) te voorkomen dient het weegschaalplateau regelmatig te worden gereinigd. Aanbeveling: na elke weging die aanleiding kan zijn tot een potentiële besmetting (bv. bij wegingen met direct contact van de huid).



Het apparaat met geen desinfecteermiddel besproeien.

Het desinfectiemiddel mag niet binnen de weegschaal doordringen.

Het wordt aanbevolen om te desinfecteren door de oppervlakte vochtig te vegen.

De verontreinigingen onmiddellijk verwijderen.